


## Скрининг колоректального рака при помощи анализа Cologuard®

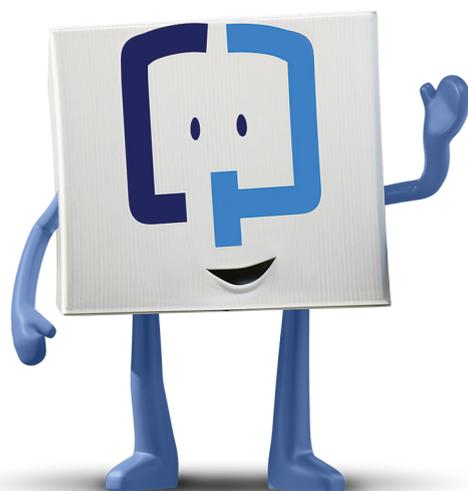

  
**cologuard**®  
by EXACT SCIENCES

Анализ Cologuard проводится для скрининга людей в возрасте от 45 лет из группы среднего риска развития колоректального рака. Только по предписанию врача.

Важная информация о рисках приводится на обороте.

## Возьмите под контроль свое здоровье, пройдя скрининг колоректального рака

Риску развития колоректального рака подвержены мужчины и женщины всех рас и национальностей<sup>1</sup>

**3-й**

Это третий по распространенности вид рака среди мужчин и женщин. Считается, что этот рак очень легко предотвратить, но в то же время большинство людей полностью пренебрегают его профилактикой<sup>2,5</sup>

**45+**

И поскольку в настоящее время растет заболеваемость колоректальным раком среди людей до 50 лет, Американское онкологическое общество рекомендует начинать скрининг в 45 лет<sup>3</sup>

**90%**

Помните об этой рекомендации. При обнаружении на ранней стадии колоректальный рак излечим у примерно 90%\* пациентов<sup>4</sup>

Именно поэтому своевременный скрининг должен стать для вас частью обычного медосмотра!

\*На основании данных о пятилетней выживаемости.

## Что означают результаты анализа

Ваш врач предоставит вам результаты примерно через две недели после получения образца лабораторией

В ходе анализа Cologuard образец кала проверяют на наличие **измененной ДНК** и **крови**, поэтому результаты будут основываться именно на этих маркерах<sup>5</sup>

**—**

Отрицательный результат означает, что в анализе не были обнаружены эти потенциальные признаки заболевания. У вас, скорее всего, нет колоректального рака<sup>5,6</sup>

**+**

Положительный результат будет означать, что эти потенциальные признаки были обнаружены. Важно знать, что положительный результат сам по себе **не** является диагнозом рака<sup>5</sup>

Не исключена возможность ложных отрицательных и положительных результатов. Обратитесь к врачу, чтобы обсудить ваши следующие действия<sup>5</sup>


**Хотите узнать больше? Дополнительные сведения и полезные видео можно найти на странице [Cologuard.com/UnderstandingResults](https://Cologuard.com/UnderstandingResults)**

## Анализ Cologuard прост в применении и доступен по цене

Анализ Cologuard оплачивается программой Medicare и большинством крупных страховых компаний. Большинству застрахованных лиц он обойдется в **\$0\***<sup>6</sup>


В целом по стране более **94%** пациентов, сдавших анализ Cologuard, не пришлось доплачивать за скрининг из собственных средств\*<sup>6</sup>

\*Последняя оценка Exact Sciences, основанная на выставлении счетов пациентам за прошедшие периоды.

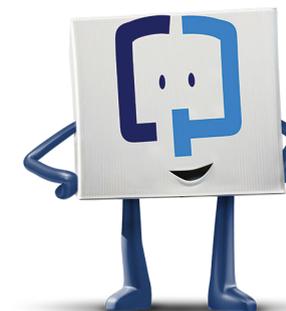

**Дополнительную информацию** о страховании можно найти на странице [Cologuard.com/insurance](https://Cologuard.com/insurance)

Мы поможем вам обратиться в страховую компанию и задать нужные вопросы. Позвоните нам по номеру **1-844-870-8870**

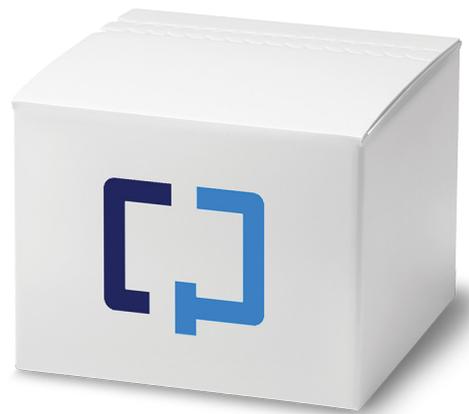

## Оторвите эту памятку с инструкцией, как отправить комплект Cologuard на анализ,

и поместите ее в место, где обычно оставляете памятки: на зеркале или двери холодильника.



Позвоните по номеру **1-844-870-8870\*** или обратитесь в чат на сайте **Cologuard.com**

Посмотрите видеоинструкцию по использованию на странице **Cologuard.com/use**

\*Доступны услуги перевода на +200 языков

Просьба вернуть комплект не позднее этой даты:



## Как пользоваться комплектом Cologuard



Получив свой комплект, распакуйте его и ознакомьтесь с прилагаемым Руководством для пациентов



Закрепите контейнер для сбора кала в держателе в унитазе



Произведите дефекацию в контейнер для сбора кала



Соберите образец в пробирку



Добавьте в контейнер для сбора кала консервант



Обязательно заполните обе этикетки



Осталось только передать посылку в UPS®. Читайте важную информацию об отправке образца на следующей странице.

## Как отправить комплект Cologuard на анализ

Воспользуйтесь **предоплаченной этикеткой UPS®**, чтобы отправить комплект с образцом на анализ в лабораторию **Exact Sciences Laboratories** в день его забора или на следующий день

Убедитесь, что отправка не выпадает на воскресенье или праздничный день

Мы предлагаем два варианта бесплатной отправки образца.

### Первый вариант.

Запланируйте вывоз посылки службой UPS на странице **Cologuard.com/UPS** или обратитесь за помощью по телефону **1-844-870-8870**

### Второй вариант.

Передайте комплект в службу UPS. На странице **Cologuard.com/UPS** вы найдете информацию о местных отделениях и их часах приема посылок

## Показания и важная информация о риске

Анализ Cologuard предназначен для скрининга людей в возрасте от 45 лет и старше из группы среднего риска развития колоректального рака. С его помощью образец кала проверяют на наличие определенных ДНК-маркеров и крови. Не использовать, если у вас были аденомы, если вы страдаете воспалительным заболеванием кишечника и определенными наследственными синдромами, а также при наличии колоректального рака в личном или семейном анамнезе. Cologuard не заменяет собой колоноскопию для пациентов в группе высокого риска. Оценка точности анализа Cologuard для людей в возрасте от 45 до 49 лет основана на крупном клиническом исследовании с участием пациентов от 50 лет.

Результаты анализа Cologuard следует интерпретировать с осторожностью. Положительный результат анализа не подтверждает наличие рака. Пациентов с положительным результатом следует направить на колоноскопию. Отрицательный результат анализа не подтверждает отсутствие рака. Пациенты с отрицательным результатом должны узнать у врача, когда им необходимо снова пройти анализ. Анализ может показать ложный положительный или отрицательный результат. В одном клиническом испытании 13% участников, не болевших раком, получили (ложный) положительный результат анализа, а 8% участников, больных раком, получили (ложный) отрицательный результат. Только по предписанию врача.

### Справочная литература:

1. Henley SJ, Ward EM, Scott S, et al. Annual report to the nation on the status of cancer, part I: national cancer statistics. *Cancer*. 2020;126(10):2225-2249.
2. National Cancer Institute. Genetics of colorectal cancer (PDQ®) - health professional version. Доступ 26 сентября 2022 г. <https://www.cancer.gov/types/colorectal/hp/colorectal-genetics-pdq>
3. Wolf AMD, Fonhtam ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society. *CA Cancer J Clin*. 2018;68(4):250-281.
4. National Cancer Institute. Cancer stat facts: colorectal cancer. Доступ 26 сентября 2022 г. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html>
5. Exact Sciences. 2022. Cologuard Patient Brochure.
6. Exact Sciences. 2022. Неопубликованные данные.

**EXACT SCIENCES**

**cologuard®**  
by EXACT SCIENCES

EXACT SCIENCES CORPORATION  
5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719  
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard является зарегистрированным товарным знаком корпорации Exact Sciences Corporation. Все другие торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

© 2023 Exact Sciences Corporation. Все права защищены.  
M-US-CG-03798-RU